



超声牙周治疗仪工作尖 使用说明书

1. 产品名称: 超声牙周治疗仪工作尖
2. 产品性能结构及组成
本品由工作部分和杆组成。通过杆与超声牙周治疗仪连接, 可固定或者可更换。由超声牙周治疗仪驱动工作。
3. 适用范围
配合超声牙周治疗仪使用, 用于清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑, 牙齿根管的清洁、荡洗。
4. 产品禁忌
 - 4.1 血友病患者禁用;
 - 4.2 带有心脏起搏器的患者/医生禁用;
 - 4.3 心脏病患者、孕妇及幼儿慎用。
5. 产品使用方法
 - 5.1 用限位扳手将工作尖拧紧在手柄上。
 - 5.2 启动超声牙周治疗仪进行临床操作, 临床操作时勿使工作尖的尖端与牙面垂直接触, 不可施重压, 以免损伤牙体及工作尖。
 - 5.3 操作完成后, 让机器在有水的条件下工作30秒左右以冲洗手柄及工作尖; 取下手柄和工作尖进行消毒。

6. 注意事项

- 6.1 工作尖拧到手柄上时必须拧紧, 且工作时必须有水雾。
- 6.2 工作尖使用前必须经过清洁消毒, 消毒及灭菌方法: 煮沸消毒法、浸泡消毒法、134°C湿热灭菌法、134°C干热消毒法。不宜采用化学消毒; 绝不能使用含有氯成分的消毒剂, 否则将对器械造成永久性的破坏。
- 6.3 请勿在牙周治疗仪工作时装卸工作尖。
- 6.4 工作尖损坏或磨损较大时, 应更换新的。
- 6.5 请勿弯曲或打磨工作尖。
- 6.6 金色工作尖在接触H₂O₂, NaClO等氧化性溶液后, 请及时用清水清洗以免对镀层造成损坏。
7. 运输、贮存、保养
 - 7.1 运输
 - 7.1.1 运输过程中应防止过度冲击和震动, 小心轻放, 避免倒置。
 - 7.1.2 运输时不应与危险品混装。
 - 7.1.3 运输时应避免日晒或雨、雪浸淋。
 - 7.2 贮存
 - 7.2.1 贮存时不要与有毒、有腐蚀性、易燃、易爆的物品混放。
 - 7.2.2 产品应贮存于相对湿度为10% ~ 93%, 大气压力为70kPa ~ 106kPa, 温度为-20°C ~ +40°C的环境下。

7.3 保养

本设备应小心轻放, 远离震源, 并应安装或保存在阴凉干燥通风处。

8. 符号说明

符号	解释说明	
	产品的制造商	产品符合WEEE指令, 按法规要求进行丢弃。
	警告、注意及重要事项! 查阅随机文件	106 70kPa ~ 106kPa 贮存条件, 大气范围为70kPa ~ 106kPa
	产品的生产日期	10% ~ 93% 10% ~ 93% 贮存条件, 湿度范围为10% ~ 93%
	怕雨, 防潮	-20°C ~ +40°C -20°C ~ +40°C 贮存条件, 温度范围为-20°C ~ +40°C
	仅用于室内	IPX1 对进液的防护程度: 1级防滴水器材



桂林市锐锋医疗器械有限公司
生产备案凭证编号: 桂桂食药监械生产20170008号
备案凭证/产品技术要求编号: 桂桂械备20200182号
备案人/生产企业/售后服务单位: 桂林市锐锋医疗器械有限公司
住所/生产地址: 桂林市七星区高新区信息产业园8-3号
销售/售后服务电话/传真: 0773-7796686
邮编: 541004 E-mail: refine@refine-med.com
网址: <http://www.refine-med.com>
使用年限: 5年 生产日期详见产品包装标签
文件编号及版本: RF-UST-M002-1.3 修订日期: 2021-09-07